

Questions / Réponses :

Que se passe-t-il durant une séance CRISTAL® ?

Votre médecin applique sur la peau de la zone à traiter une lingette imprégnée de gel cryoprotecteur. Une fois l'applicateur posé, la cristallisation des graisses commence, avec des paramètres individuels choisis selon vos attentes et vos besoins. Confortablement installé, vous n'avez plus qu'à vous détendre, lire ou écouter de la musique. Une fois la séance terminée, votre médecin massera la zone traitée pendant une dizaine de minutes pour accélérer le processus lymphatique et l'élimination des cellules graisseuses. Le traitement peut être complété par une séance de LED pour régénérer la peau.

Combien de temps dure une séance de CRISTAL® ?

Une séance de CRISTAL® dure en moyenne 60 minutes par zone. Vous pouvez choisir de vous divertir en lisant ou en écoutant de la musique, ou simplement vous détendre.

Puis-je reprendre une activité normale après une séance ?

Il n'y a aucun temps d'arrêt nécessaire avec le traitement CRISTAL® car c'est une méthode non invasive. Vous pouvez donc reprendre vos activités quotidiennes dès la fin de la séance.

Quand vais-je constater les résultats ?

Il n'y a pas de résultats immédiats car les cellules graisseuses sont éliminées progressivement par le système lymphatique. A partir de 4 à 6 semaines, vous pourrez observer les résultats, mais vous continuerez à éliminer pendant les mois qui suivent.

La cryolipolyse médicale par CRISTAL® est-elle sûre ?

Sans douleur ? Présente-t-elle des effets secondaires ?

Le traitement par CRISTAL® est non invasif, sans douleur, et parfaitement sûr. Cette technique cristallise uniquement les cellules graisseuses et n'affecte aucun autre tissu environnant. Les effets secondaires sont légers tels que des rougeurs, de petites ecchymoses ou enflures ainsi qu'une sensation d'engourdissement de la zone traitée. Ces effets disparaissent naturellement dans les heures ou les jours qui suivent la séance. Il n'y a aucun temps d'arrêt nécessaire et vous pouvez reprendre vos activités dès la fin du traitement.

Combien de séances sont nécessaires ?

Les résultats varient d'un patient à un autre, mais il suffit en général d'une à trois séances pour obtenir les résultats que vous désirez.

Les résultats sont-ils permanents ?

La graisse est cristallisée puis éliminée définitivement de votre corps, le résultat est donc permanent. A vous de prendre soin de votre toute nouvelle silhouette grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.

Plaquette-Patient-Cristal-30062017

CRISTAL®, conçu et fabriqué par DELEO (France).

Dispositif médical de classe IIa. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, délivré par l'organisme notifié BSI. Il permet de traiter principalement les amas graisseux localisés par le froid. Prendre connaissance de la notice avant toute utilisation. Respecter les conditions d'utilisation mentionnées sur la notice. En cas de doute sur l'utilisation / contre-indications, il est recommandé de consulter préalablement votre médecin.

Prise de rendez-vous pour
une séance de CRISTAL® :


Pour plus d'informations :
www.cryolipolysecristal.com



CRISTAL®

Découvrez la cryolipolyse médicale

Cristallisez les graisses tenaces et redessinez vos courbes

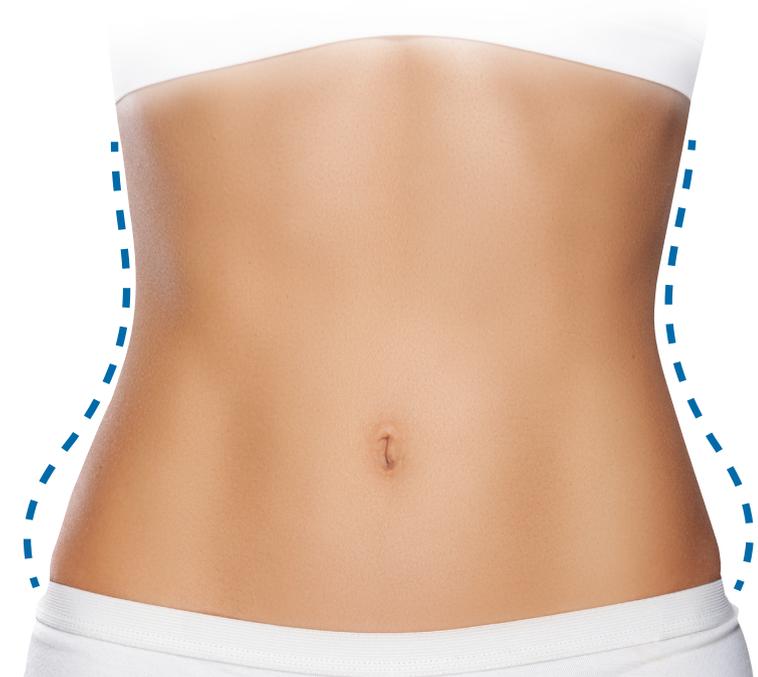

- Résultats permanents et définitifs
- Efficacité prouvée
- Non invasif & sans anesthésie
- Système sécurisé et médicalisé

BY Deleo
CRÉATEUR EN
ESTHÉTIQUE MÉDICALE



La solution idéale pour une silhouette harmonieuse en toute simplicité !

Qu'est ce que la cryolipolyse médicale CRISTAL®?

Cette procédure permet la cristallisation des cellules graisseuses qui s'autodétruisent sous l'action du froid.

La graisse cristallisée va ensuite s'éliminer naturellement et définitivement au fil des semaines suivant la séance, pour laisser place à des courbes harmonieuses.

Cette technique novatrice qui garantit efficacité et sécurité, est non invasive et ne nécessite aucune anesthésie. Une fois la séance terminée, vous pourrez retourner à vos activités en toute simplicité !

Polyvalente, CRISTAL® permet le traitement de nombreuses zones chez l'homme et la femme :

- Menton
- Bras
- Ventre
- Poignées d'amour
- Culotte de cheval
- Cuisses
- Genoux

Au bout de 8 semaines, le résultat est optimal et définitif : il ne vous reste plus qu'à profiter de votre nouvelle silhouette.

CRISTAL® est la référence en cryolipolyse médicale.

Le traitement par CRISTAL® est-il fait pour moi ?

Oui, si vous cherchez une méthode efficace pour harmoniser votre silhouette sans chirurgie et en toute sécurité.

Oui, si vous recherchez une méthode douce et sans douleur pour perdre vos bourrelets disgracieux.

Pendant le traitement CRISTAL®, vous pourrez lire ou écouter de la musique pour rendre la séance plus agréable.

Des résultats visibles et définitifs

